




NOTICE D'INSTRUCTIONS PRODUIT

CATÉGORIE DE PRODUIT : Tests olfactifs microencapsulés de Sensonics

NOM DU PRODUIT : Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

DESCRIPTION :

Cette version en 12 items du Smell Identification Test®, également connu sous le nom de Cross-Cultural Smell Identification Test, est utile pour quantifier la perte d'odorat dans des situations où l'on dispose de moins de cinq minutes. Ce test est utile dans les enquêtes de population et les études générales sur le lieu de travail. Les odeurs sont bien connues dans la plupart des cultures. Les valeurs en pourcentage, établies sur la base de milliers de participants, sont disponibles dans le manuel d'administration du Brief Smell Identification Test™. Si c'est la première fois que vous commandez, nous vous recommandons d'acheter ce manuel.

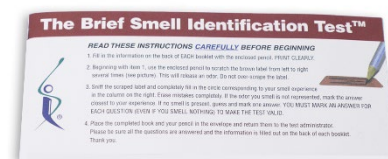

INSTRUCTIONS :

- Remplissez les informations au dos de CHAQUE livret avec le crayon fourni. VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT.
- En commençant par l'item 1 du livret, utilisez le crayon joint pour gratter l'étiquette brune de gauche à droite plusieurs fois (voir image). Une odeur se dégagera. Ne grattez pas trop l'étiquette.
- Reniflez l'étiquette grattée et renseignez soigneusement le cercle correspondant à votre expérience olfactive dans la colonne de droite. Effacez complètement les erreurs. Si l'odeur que vous sentez n'est pas représentée, cochez la réponse la plus proche de votre expérience. Si aucune odeur n'est présente, devinez et cochez une réponse. VOUS DEVEZ COCHER UNE RÉPONSE POUR CHAQUE QUESTION (MÊME SI VOUS NE SENTEZ RIEN) POUR QUE LE TEST SOIT VALIDE.
- Déposez le livret rempli et votre crayon dans l'enveloppe et renvoyez-les à l'administrateur du test. Veillez à répondre à toutes les questions et à remplir les informations au dos du livret. Merci.



Each test is single use only




Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature

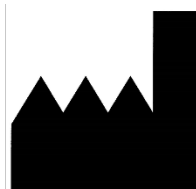

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands