




ÜRÜN TALİMAT SAYFASI

ÜRÜN KATEGORİSİ: Sensonics Mikrokapsülenmiş Koku Testleri

ÜRÜN ADI: Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

TANIM:

Smell Identification Test®'in bu 12 maddelik sürümü, Kültürler Arası Koku Tanıma Testi olarak da bilinir ve beş dakikadan kısa bir sürenin verildiği durumlarda koku kaybını ölçmek için kullanılır. Bu test, popülasyon anketlerinde ve genel işyeri çalışmalarında yararlıdır. Kokular çoğu kültürde iyi bilinmektedir. Binlerce gönüllüye dayanan yüzdelik normlar, Brief Smell Identification Test™ Uygulama Kılavuzunda mevcuttur. İlk kez sipariş veriyorsanız, bu kılavuzu satın almanızı öneririz.

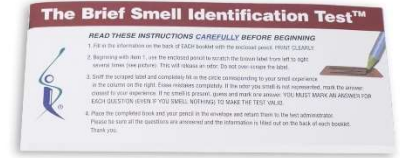

TALİMATLAR:


- HER kitapçık arkasındaki bilgileri verilen kalemle doldurun. AÇIK ŞEKİLDE YAZDIRIN.
- Kitapçığın 1. maddesinden başlayarak birlikte verilen kalemle kahverengi etiketi soldan sağa birkaç kez kazıyın (resme bakın). Bu bir koku yayacaktır. Etiketini aşırı kazımayın.
- Kazınan etiketi koklayın ve deneyiminize karşılık gelen kokuyu sağdaki sütunda daire içine alın. Hataları tümüyle silin. Kokladığımız koku yoksa, en yakın yanıtı işaretleyin. Herhangi bir koku almazsanız, tahmin edin ve bir yanıtı işaretleyin. TESTİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN (HIÇ BİR KOKU ALMASANIZ BİLE) HER SORU İÇİN BİR YANITI İŞARETLEMELİSİNİZ.
- Tamamlanmış kitapçığı ve kaleminizi zarfa koyun ve test yöneticisine geri verin. Lütfen tüm sorulara yanıt verdiğinizden ve kitapçık arkasındaki bilgilerin doldurulduğundan emin olun. Teşekkür ederiz.



Each test is single use only



Keep Dry

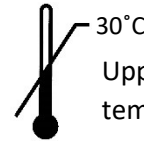

30°C

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands