




NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU

KATEGÓRIA PRODUKTU: Testy rozpoznania arómy na báze mikrokapsúl Sensonics

NÁZOV PRODUKTU: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

OPIS:

The Smell Identification Test™ [UPSIT] je náš komplexný 40-položkový test. Je to najspoľahlivejší (test – retest, $r = 0,94$) a najpresnejší dostupný čuchový test. Je to celosvetový štandard testovania čuchu. Poskytuje absolútny údaj o strate čuchu (anosmia; ľahká, mierna alebo závažná mikrosómia), ako aj relatívny údaj na základe percentilov v súvislosti s vekom a pohlavím. Poskytuje tiež ukazovateľ na detekciu simulovania. Súčasťou sú hodnoty od takmer 4 000 mužov a žien všetkých vekových kategórií. Pre tých, ktorí ho kupujú prvýkrát, odporúčame príručku na podanie SITTM, ktorá obsahuje vo vnútri predného obalu hodnotiaci kľúč.

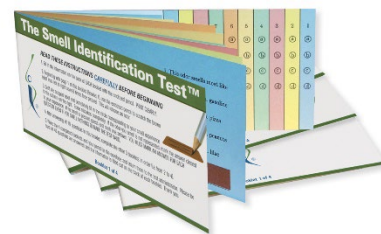

POKYNY:


- Priloženou ceruzkou vyplňte údaje na zadnej strane KAŽDEJ brožúry. PÍŠTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI PÍSMENAMI.
- Začnite na 1. strane brožúry č. 1 a priloženou ceruzkou prejdite niekoľkokrát zľava doprava po hnedom prúžku (pozri obrázok). Týmto sa uvoľní aróma. Nezoškrabte celý prúžok.
- Privoňajte k poškriabanému prúžku a v stĺpci na pravej strane vyplňte krúžok, ktorý zodpovedá tomu, čo cítite. Ak sa pomýlite, krúžok úplne vygumujte. Ak danú arómu nevystihuje žiadna možnosť, označte odpoveď, ktorá najbližšie zodpovedá tomu, čo cítite. Ak necítite žiadnu arómu, skúste uhádnuť a označte jednu odpoveď. **ABY BOL TEST PLATNÝ, PRI KAŽDEJ OTÁZKE MUSÍTE OZNAČIŤ JEDNU ODPOVEĎ (AJ KEĎ NIČ NECÍŤITE).**
- Po zodpovedaní všetkých 10 otázok v brožúre zaradom (t. j. od 2. po 4.) vyplňte ostatné tri brožúry.
- Štyri vyplnené brožúry a ceruzku vložte do obálky a odovzdajte ju administrátorovi testu. Skontrolujte, či ste odpovedali na všetkých 40 otázok a vyplnili údaje na zadnej strane každej brožúry. Ďakujeme.




Each test is single use only



Keep Dry

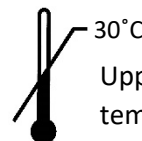

Upper limit storage temperature

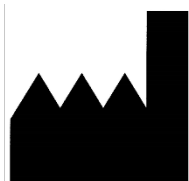

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands