




LÄKEMEDEL INSTRUKTIONSBLAD

PRODUKT KATEGORI: Sensonics mikroinkapslade lukttester

PRODUKT NAMN: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

BESKRIVNING:

The Smell Identification Test™ [UPSIT] är vårt omfattande test med 40 artiklar. Det är det mest pålitliga (test- retest $r=0,94$) och exakta lukttest som finns. Det är den världsomspännande standarden för lukttestning. Ger en absolut indikation på lutförlust (anosmi; mild, måttlig eller svår mikrosomi) samt en relativ indikation baserad på ålders- och könsrelaterade percentiler. Tillhandahåller också ett index för att upptäcka malingering. Normer från nästan 4 000 män och kvinnor som spänner över hela åldersspannet ingår. För förstagångsköpare rekommenderar vi SITT Administration Manual, som inkluderar poängnyckel på insidan av frontpärmen.

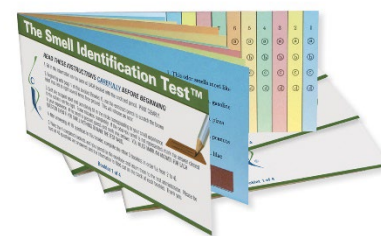

INSTRUKTIONER:


- Fyll i informationen på baksidan av VARJE broschyr med den bifogade blyertspennan. SKRIV TYDLIGT.
- Börja med sidan 1 i häfte 1 använd den medföljande pennan för att repa den bruna etiketten från vänster till höger flera gånger (se bild). Detta frigör en doft. Skrapa inte etiketten för mycket.
- Lukta på den skrapade etiketten och fyll i cirkeln som motsvarar din luktupplevelse i kolumnen till höger. Radera misstag helt och hållet. Om den doft du känner inte finns angiven, markera det svar som ligger närmast din upplevelse. Om du inte känner någon lukt, gissa och markera ett svar. DU MÅSTE MARKERA ETT SVAR FÖR VARJE FRÅGA (ÄVEN OM DU INTE KÄNNER NÅGON LUKT) FÖR ATT TESTET SKA VARA GILTIGT.
- Efter att ha besvarat alla 10 frågorna i häftet, fyll i de andra tre häften i ordning (dvs. från 2 till 4).
- Lägg de fyra ifyllda broschyrerna och din blyertspenna i kuvertet och lämna tillbaka dem till testadministratören. Se till att alla 40 frågor besvaras och att informationen fylls i på baksidan av varje broschyr. Tack.




Each test is single use only



Keep Dry

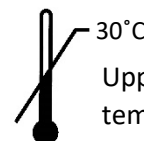

Upper limit storage temperature

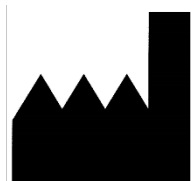

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands