



LÄKEMEDELSINSTRUKTIONSBLAD

LÄKEMEDELSKATEGORI: Sensonics smakttestremsor

PRODUKTNAMN: Waterless Empirical Taste Test (WETT®)

VIKT: 1,035 kg

MÅTT: 7,25 x 11 x 10 tum


BESKRIVNING:



Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®) är en enkel och billig metod för kvantitativ utvärdering av smakfunktionen. Tillförsel av smakämnen sker via plastremsor med patenterade plattor av monomercellulosa som är inbäddade med antingen sackaros (söt), citronsyra (sur), natriumklorid (saltig), koffein (bitter), mononatriumglutamat (umami) eller blanka smakämnen. Ingen vätskesköljning krävs. 50 remsor av varje smakämne tillhandahålls i bärbara behållare av hårdplast. För förstagångsinköpare rekommenderar vi *Sensonics Waterless Empirical Taste Test™ test- och utvärderingsmanual*, som innehåller ytterligare information om testadministreringsproceduren.

INSTRUKTIONER:

- WETT® ska helst administreras i en tyst testmiljö utan distraktioner.
- För testning ska administratören placera satsen på en arbetsyta som är vänd mot honom/henne och be försökspersonen sitta på andra sidan om satsen. Ge försökspersonen en liten mugg eller annan sopkorg för att kassera smaksatta remsor efter användning.
- Bedömare ska bära skyddshandskar av oparfymerad latex under testningen. Smakremsorna ska inte vidröras utan dessa.
- Varje smakremsa numreras i ordningsföljd. Presentera smakremsorna i den ordning som anges på WETT®-testbladet, som medföljer satsen.
- Be försökspersonen placera smaksektorn på tungan och flytta den runt tungan, inklusive kanterna och baksidan av tungan.
- Efter provsmakning av varje remsa ska du fråga försökspersonen vilket av följande som han/hon smakade: söt, sur, salt, bitter, buljong (soppa, smakrik) eller ingen smak alls. De smakremsor som används i detta test är säkra.
- Använd WETT®-poängnyckeln för att utvärdera testresultatet.
- Administreringstiden för WETT®-testet varierar beroende på försökspersonens smakförmåga. För de flesta normala försökspersoner är testtiden för administrering 10 till 15 minuter.

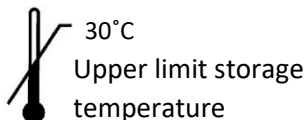

30°C
Upper limit storage
temperature



Keep Dry



MANUFACTURER www.sensonics.com

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands