



## PRODUCTINSTRUCTIES

**PRODUCTCATEGORIE:** Sensonics Snap & Sniff® Milieuvriendelijke Reuktest

**PRODUCTNAAM:** Snap & Sniff® Geuridentificatietest (S&S-I)

**GEWICHT:** 8.68 lb. (3.937 kg)

**AFMETINGEN:** 9.5 x 9.5 x 11 in (24.1 x 24.1 x 27.9 cm)

### BESCHRIJVING:

Met behulp van de gepatenteerde gebruiksvriendelijke Snap & Sniff®-staafjes, bevat deze geuridentificatietest de volgende 16 geuren: sinaasappel, pepermint, terpentijn, kruidnagel, leer, banaan, knoflook, rozen, vis, citroen, koffie, anijs, kaneel, drop, appel en ananas. Het antwoordblad toont opties in afbeeldings- en woordformaat voor gebruik met volwassenen en kinderen, waaronder personen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Geurmiddelen worden gekozen voor interculturele bekendheid.



### INSTRUCTIES:

#### Algemene instructies

- De toedieningstijd van de geuridentificatietest neemt gewoonlijk minder dan 15 minuten in beslag.
- De test kan worden uitgevoerd als een bilaterale (beide neusgaten) evaluatie of als unilaterale evaluatie.
- Als een proefpersoon een significante neusverstopping heeft (zelfs in één neusgat) op de dag die gepland is voor evaluaties van de geurtesten, moet worden overwogen om het testen uit te stellen.

#### Testmaterialen

- Sensonics International Snap and Sniff® geuridentificatietestkit (meervoudig gebruik).
- Antwoordformulier geuridentificatietest (om de antwoorden van de proefpersoon vast te leggen).
- Potlood (aanbevolen) of pen.

#### Testomgeving

- Voer de beoordeling uit in een rustige ruimte met schone lucht en indien mogelijk bij een temperatuur van **20 - 21,7 °C (68 - 71 °F)**. Vermijd testen in omgevingen die te warm of te koud zijn.
- Laat de testkit 10 tot 15 minuten voorafgaand aan de aanvang van de test op kamertemperatuur komen, vooral als deze op een andere temperatuur wordt bewaard (bijv. in de koelkast).
- Zowel de tester als de proefpersoon moeten vermijden om tijdens het testen parfum, crèmes of andere sterke geuren te dragen. Raad de proefpersoon ook aan om sterke geuren te vermijden op de dag van deze test.
- Was uw handen grondig met niet-geparfumeerde zeep. Als uw handen naar tabak ruiken, draag dan geurloze, niet-geparfumeerde handschoenen.

#### Vorbereiding op de testafname

- Druk voorafgaand aan de test op de rand van elk staafje om het uiteinde ervan te openen en eventuele tijdens opslag opgehoopte geur te laten verdwijnen. Als de kit nieuw is, zal een klein stukje plakband aan de kraag van elk staafje bevestigd zijn. Verwijder de plakband en gooi deze weg voordat u het staafje gebruikt.
- Plaats de kit voorafgaand aan het testen op een vlak oppervlak of tafel.

#### Instructies voor de proefpersoon

- Lees de volgende instructies aan de proefpersoon voor, zodat hij/zij de testprocedure duidelijk begrijpt: ***“Deze test is ontworpen om uw vermogen te bepalen om vaak voorkomende geuren te identificeren. De chemicaliën die in deze test worden gebruikt, zijn veilig, worden in veel consumentenproducten aangetroffen en zijn door duizenden proefpersonen***

**zonder nadelige effecten geroken. U krijgt 16 afzonderlijke staafjes aangeboden, die elk een andere geur bevatten. U moet op het antwoordformulier aangeven welke van de vier geuropties het was. Als u het niet zeker weet, moet u raden.”**

- Voordat u de eerste geur van de test aanbiedt, moet u het proces aan de proefpersoon laten zien door een staafje aan te bieden zoals u tijdens de test zult doen, of door de proefpersoon te laten proberen een staafje te gebruiken als hij/zij de test zelf uitvoert.

### **TESTPROCEDURE**

#### **Aanbieden van geuren**

- Neem het staafje uit de doos.
- Plaats de punt van het staafje onder de neus van de proefpersoon, dicht bij het gebied tussen de twee neusgaten, en druk met uw duim op de rand om de geur vrij te geven.
- Houd dit aan voor 3 tot 5 seconden. Vraag de proefpersoon om te ruiken.
- Als een professional de test afneemt, vertel de proefpersoon dan dat hij/zij naar de afbeelding/naam moet wijzen die het meest overeenkomt met de geur van het staafje.
- Als de proefpersoon de test zelf uitvoert, vertel de proefpersoon dan om een X op de afbeelding/naam te zetten die het meest ruikt zoals de geur die ze hebben geroken.
- Sluit de geurpunt door de rand los te laten of deze terug naar de onderkant van het staafje te duwen en plaats het staafje terug in de het gat van de houder.
- Bied de staafjes aan in de op het antwoordformulier aangegeven volgorde.

#### **Noteren van de antwoorden**

- De staafjes zijn voorzien van de nummers 1 tot en met 16 en de antwoordformulieren bieden een gemakkelijk te volgen aanbiedingspatroon voor elk onderzoek.
- Voor elke regel op het antwoordformulier moet een X over de door de proefpersoon geïdentificeerde afbeelding/naam geplaatst zijn.
- Zodra het testen is voltooid, plaatst u een vinkje in het vakje rechts van elke correct geïdentificeerde geur. Tel de vinkjes voor het resultaat van de proefpersoon/patiënt.

### **ONDERHOUD EN BEWAREN VAN DE TESTKIT**

- Controleer aan het einde van elke test of de geurpunt van elk staafje volledig gesloten is. Als de veer van het staafje om welke reden dan ook de geurpunt niet volledig sluit, kan de geurpunt worden gesloten door de rand terug te duwen naar de onderkant van het staafje. Als het staafje vast komt te zitten, breng dan wat Krytox-smeermiddel (meegeleverd bij elke kit) aan om de zwarte O-ring te smeren die vrijkomt bij het induwen van de grand.
- **Bewaar de testkit op een veilige plaats onder 21,7°C (71°F). Het kan in de koelkast worden bewaard. Bewaar de kit niet in een ruimte met een hoge temperatuur.**



30°C

Maximale  
bewaartemperatuur



Droog bewaren



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands