



PRODUCTINSTRUCTIES

PRODUCTCATEGORIE: Sensonics Snap & Sniff® Milieuvriendelijke Reuktest

PRODUCTNAAM: Snap & Sniff® Geur Discriminatietest (S&S-D)

GEWICHT: 14.76 lb. (6.695 kg)

AFMETINGEN 11 x 15.5 x 17 in. (27.9 x 39.3 x 43.2 cm)



BESCHRVING:

Deze geur discriminatietest, met in de gepatenteerde gebruikersvriendelijke Snap & Sniff®-staafjes bevatte geuren, maakt gebruik van de volgende geurstoffen: rozen, drop, banaan en verbrand rubber. Omdat de geurstof kort wordt weergegeven, wordt de geur veel langer vastgehouden en kan deze worden gebruikt om veel meer proefpersonen te testen dan apparaten zonder dergelijke geavanceerde technologie zouden kunnen. Dit optimaliseert het aantal onderzoeken dat wordt aangeboden per eenheidstijd. Bevat een ergonomisch ontworpen draagkoffer.

INSTRUCTIES:

Algemene instructies

- Alleen gekwalificeerde professionals mogen de test uitvoeren.
- De toedieningstijd van de geur discriminatietest neemt gewoonlijk minder dan 15 minuten in beslag.
- De test kan worden uitgevoerd als een bilaterale (beide neusgaten) evaluatie of als unilaterale evaluatie.
- Als een proefpersoon een significante neusverstopping heeft (zelfs in één neusgat) op de dag die gepland is voor evaluaties van de euktesten, moet worden overwogen om het testen uit te stellen.

Testmaterialen

- Sensonics International Snap and Sniff® Geur Discriminatietest (voor meervoudig gebruik).
- Antwoordformulier geurdiscriminatietest (om de antwoorden van de proefpersoon vast te leggen).
- Potlood (aanbevolen) of pen.

Testomgeving

- Voer de beoordeling uit in een rustige ruimte met schone lucht en indien mogelijk bij een temperatuur van **20 - 21,7 °C (68 - 71 °F)**. Vermijd testen in omgevingen die te warm of te koud zijn.

- Laat de testkit 10 tot 15 minuten voorafgaand aan de aanvang van de test op kamertemperatuur komen, vooral als deze op een andere temperatuur wordt bewaard (bijv. in de koelkast).
- Zowel de tester als de proefpersoon moeten vermijden om tijdens het testen parfum, crèmes of andere sterke geuren te dragen. Raad de proefpersoon ook aan om sterke geuren te vermijden op de dag van deze test.
- Was uw handen grondig met niet-geparfumeerde zeep. Als uw handen naar tabak ruiken, draag dan geurloze, niet-geparfumeerde handschoenen.

Vorbereiding op de testafname

- Druk voorafgaand aan de test op de rand van elk staafje om het uiteinde ervan te openen en eventuele tijdens opslag opgehoopte geur te laten verdwijnen. Als de kit nieuw is, zal een klein stukje plakband aan de rand van elk staafje bevestigd zijn. Verwijder de plakband en gooi deze weg voordat u het staafje gebruikt.
- Plaats de testkit zodanig op de tafel dat de proefpersoon de etiketten op de bovenkant van de staafjes niet kan zien. Gebruik het deksel van de doos om het zicht van de proefpersoon te blokkeren.
- De testafnemer moet aan de hoek van de tafel zitten en de proefpersoon zodanig laten zitten dat zijn/haar neus gemakkelijk binnen bereik is van de voorkeurshand van de persoon die de test afneemt.

Instructies voor de proefpersoon

- Lees de volgende instructies aan de proefpersoon voor, zodat hij/zij de testprocedure duidelijk begrijpt: ***“Deze test is ontworpen om uw vermogen te bepalen om onderscheid te maken tussen verschillende geuren. Bij elk onderzoek van deze test met meerdere onderzoeken krijgt u drie geuren van geurstaafjes aangeboden, de ene na de andere. Twee van de staafjes hebben dezelfde geurstof en één is een compleet andere geur. U moet aangeven of het eerste, tweede of derde staafje anders is dan de andere twee. Ik zal u vertellen wanneer u moet ruiken. Als u geen verschil kunt onderscheiden, moet u uw best doen om te onderscheiden welke geur anders is dan de andere twee.”***
- Voordat de test voor het eerst wordt uitgevoerd, moet het proces aan de proefpersoon worden voorgetoond, waarbij een eerste, tweede en derde staafje wordt aangeboden.

TESTPROCEDURE

Aanbieden van geuren

- Neem het staafje uit de doos.
- Plaats de tip van het staafje onder de neus van de proefpersoon, dicht bij het gebied tussen de twee neusgaten, en druk met uw duim op de rand om de geur vrij te geven.
- Houd dit aan voor ongeveer 2 seconden. Vraag de proefpersoon om te ruiken.
- Geef hardop het volgnummer van het getoonde staafje aan: *“hier is het eerste staafje.”*
- Sluit de geurpunt door de rand los te laten of deze terug naar de onderkant van het staafje te duwen en plaats het staafje terug in het gat van de houder.
- Herhaal de voorgaande stappen met het tweede en dan het derde staafje.

- Geef hardop het volgnummer van elk aangeboden staafje aan: “*hier is het tweede staafje; hier is het derde staafje.*”
- Vraag de proefpersoon om een antwoord te geven dat aangeeft welk ervan anders ruikt: het eerste, het tweede of het derde.

Noteren van de antwoorden

- De staafjes zijn voorzien van de nummers 1 tot en met 20 en de antwoordformulieren bieden een gemakkelijk te volgen aanbiedingspatroon voor elk onderzoek.
- Omcirkel het eerste, tweede of derde cijfer op het antwoordformulier op basis van het antwoord van de patiënt.
- Zodra het testen is voltooid, telt u de rode cijfers die omcirkeld zijn. Dat zal u het testresultaat geven, d.w.z. het aantal juiste antwoorden.

ONDERHOUD EN BEWAREN VAN DE TESTKIT

- Controleer aan het einde van elke test of de geurpunt van elk staafje volledig gesloten is. Als de veer van het staafje om welke reden dan ook de geurpunt niet volledig sluit, kan de geurpunt worden gesloten door de rand terug te duwen naar de onderkant van het staafje. Als het staafje vast komt te zitten, breng dan wat Krytox-smeermiddel (meegeleverd bij elke kit) aan om de zwarte O-ring te smeren die vrijkomt bij het induwen van de rand.
- ***Bewaar de testkit op een veilige plaats onder 21,7°C (71°F). Het kan in de koelkast worden bewaard. Bewaar de kit niet in een ruimte met een hoge temperatuur.***



30°C

Maximale
bewaartemperatuur



Droog bewaren



MANUFACTURER

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands