




## **BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES**

**PRODUCTCATEGORIE:** Sensonics' Smaakstriptests

**PRODUCTNAAM:** Zelf-toegediende waterloze empirische smaaktest (WETT®-SA53)

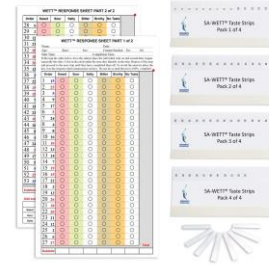

### **BESCHRIJVING:**

De korte zelf-toegediende waterloze empirische smaaktest (WETT®-SA53) is een eenvoudige en goedkope methode voor het kwantitatief evalueren van de smaakfunctie. De toediening van stoffen gebeurt via plastic wegwerpstrips met bedrijfseigen doekjes van monomeer cellulose die zijn ingebed met sucrose (zoet), citroenzuur (zure), natriumchloride (zout), cafeïne (bitter), mononatriumglutamaat (umami) of lege smaakstoffen. Er is geen spoeling met vloeistof vereist. De teststrips bevinden zich in twee zakjes of verpakkingen waar ze afzonderlijk kunnen worden uitgethaald voor testgebruik. De eerste verpakking bevat strips die zijn genummerd van 1 tot 14, de tweede 15 tot 27, de derde 28 tot 40, en de vierde 41 tot 53.

### **INSTRUCTIES:**

- De WETT® moet idealiter worden toegediend in een rustige testomgeving zonder afleidingen.
- De WETT®-SA53 moet op een tafel of een geschikte werkplek worden geplaatst. Na gebruik moet elke smaakstrip worden weggegooid in een afvalbak, zoals een prullenbak.
- De proefpersoon (of patiënt) moet tijdens het testen niet-geparfumeerde latex handschoenen dragen. Om de smaakstoffen niet te verontreinigen, mogen de smaakstrips niet zonder handschoenen worden aangeraakt.
- Plaats elke strip één voor één, beginnend met stripnummer 1, gedurende 5 tot 10 seconden op en rond uw tong, met name de zijkant. Vul op het meegeleverde antwoordformulier de cirkel in onder de smaak die u op de strip aangeeft als zoet, zuur, zout, bitter, bouillonachtig (soepachtige, hartige smaak) of helemaal geen smaak.
- Gooi de strip weg en ga verder met de volgende strip, totdat u alle strips hebt voltooid.
- Om de juiste antwoorden te onthullen, legt u de antwoordsleutel over het antwoordblad.
- Als de onderzoeker niet wil dat de proefpersoon zelf een score geeft aan de test, dan mag het antwoord niet met de kit worden meegeleverd en mag de proefpersoon dit element van de instructies niet krijgen.



30°C  
Upper limit  
storage



Keep Dry



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702  
www.sensonics.com

MANUFACTURER



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands