



NOTICE D'INSTRUCTIONS PRODUIT

CATÉGORIE DE PRODUIT : tests olfactifs microencapsulés de Sensonics (++)G051SITTK)

NOM DU PRODUIT : le Pocket Smell Test™ (PST)

DESCRIPTION :

Le Pocket Smell Test™ constitue un moyen rapide, à choix forcé, de tester le fonctionnement du nerf crânien I. Pour caractériser pleinement un problème olfactif découvert par ce test, administrez le Smell Identification Test™ à 40 items. Ce dernier test fournit des normes pour les deux sexes et tous les âges, des catégories diagnostiques claires et des moyens de détecter la simulation de maladie.



INSTRUCTIONS :

- Dégagez la première odeur avec la pointe d'un crayon ou d'un stylo.
- Lisez les possibilités de réponse au/à la patient(e) et entourez la réponse du/de la patient(e).
- Si vous le souhaitez, testez chaque narine séparément.
- Répétez l'opération avec les autres odeurs.
- Une ou plusieurs réponses incorrectes suggèrent un dysfonctionnement olfactif. Pour caractériser pleinement le problème, administrez le Smell Identification Test™ à 40 items.



Chaque test de poche est à usage unique



Conserver au sec



30°C

Limite supérieure de la température de stockage



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands